

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


системы обогрева пациента «РАМОНАК-01»



Работать с системой разрешается только специалистам, прошедшим обучение и изучившим руководство по эксплуатации.



Запрещается использовать систему без гелевых пластин или водяного матраса. **ГЕЛЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫВАТЬ СВЕРХУ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ!**

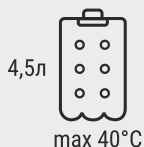

Используйте только дистиллированную воду для заполнения матрасика, удалите оставшийся воздух. **ЗАМЕНА ВОДЫ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В 6 МЕС.**



Хранить нагревательный модуль в горизонтальном положении. **НЕ ПЕРЕГИБАТЬ** во избежание переломов и трещин. Не кладите сверху тяжелые предметы.



Не подвергайте изделие воздействию колющих и режущих предметов.



Перед подключением кабеля к розетке, убедитесь, что выключатель сети на приборе в положении «0».



Берегите соединительные кабели от повреждений и перегибов. При отключении кабеля тяните только за корпус разъема, не за кабель.



Держите систему в чистоте. При очистке поверхностей применяйте рекомендуемые растворы, избегайте агрессивных средств!



При обнаружении неисправностей выключите систему (отключите ее от электросети) и свяжитесь с сервисной службой. **НЕ ПЫТАЙТЕСЬ** самостоятельно ремонтировать систему.

