


ОДЕЯЛО СПАСАТЕЛЬНОЕ «СОНЕЙКА»

для защиты пострадавших от переохлаждения
или перегрева в чрезвычайных ситуациях,
для комплектации аптечек
первой медицинской помощи.

160x210 см
серебристый/золотистый

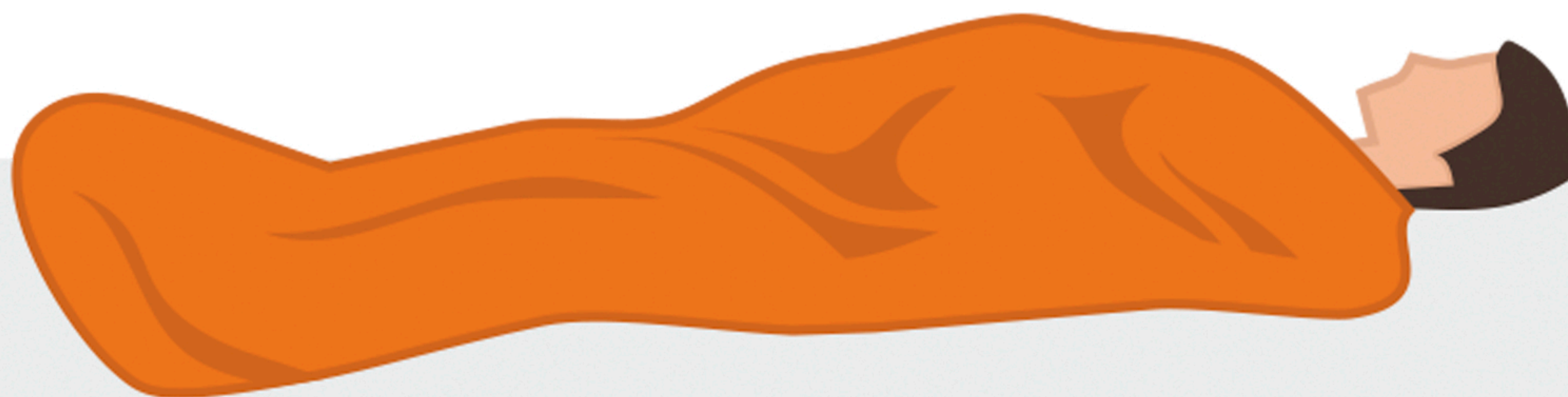

Защита от переохлаждения, серебристой стороной к телу:

1. Расстелить спасательное одеяло
2. Уложить пострадавшего поверх одеяла на бок
3. Обернуть одеялом, оставить лицо открытым
4. Зафиксировать край одеяла липкой лентой
5. Вызвать скорую помощь

Защита от перегрева, золотистой стороной к телу:

1. Накрыть пострадавшего одеялом,
обеспечив свободный доступ воздуха к телу
2. Вызвать скорую помощь

Избегайте повреждения одеяла
острыми предметами!

